

モニタ表示トラブルシューティング

以下のケースに応じて、それぞれの内容をご参照ください。

1. すべてのモニタに何も表示されない
 2. 汎用モニタ(検査リストが表示されるモニタ)が表示されない
 3. 高精細モニタ(MG 画像が表示されるモニタ)が表示されない
-

※各画像は一例です。施設によって納入されているモニタが異なります。

1. すべてのモニタに何も表示されない

①PC の電源が入っていますか？

→PC 本体の電源ランプが点灯していることを確認します。



②電源タップのスイッチが入っていますか？

→電源タップのスイッチを ON にします(ランプが点灯します)。



③スリープモードになっていませんか？

→キーボードの任意のキーを押下し、スリープモードを解除します。

2. 汎用モニタ(検査リストが表示されるモニタ)が表示されない

①モニタの電源が入っていますか？

→モニタの電源ボタンを押下します。

※すでにモニタ電源が入っていた場合は、再度電源ボタンを押下して電源を入れた状態にしてください。



②モニタの電源ケーブルはきちんと接続されていますか？


→モニタ本体に接続されている電源ケーブル、コンセントに接続されている電源ケーブルがきちんと接続されていることを確認します。もしくは、一度外して再接続します。



③モニタと PC を接続するビデオケーブルはきちんと接続されていますか？

→ビデオケーブルのモニタ側、PC 側にてきちんと接続されていることを確認します。

もしくは、一度外して再接続します。

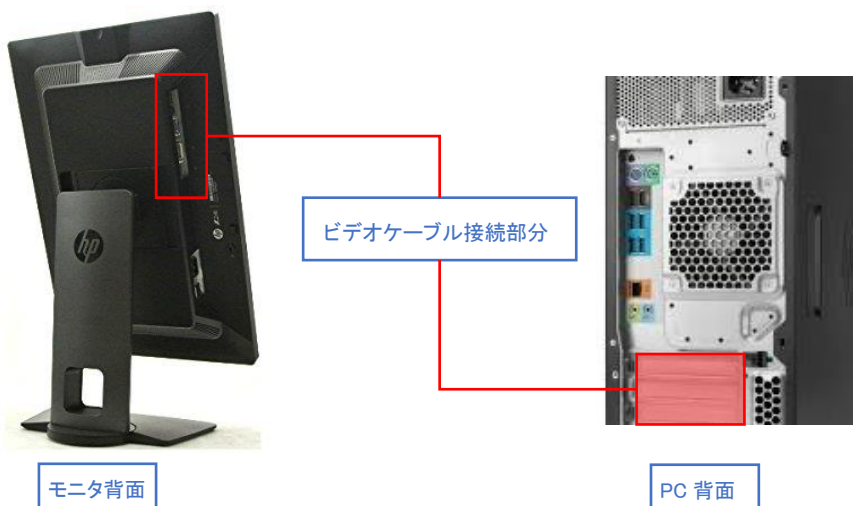

3. 高精細モニタ(MG 画像が表示されるモニタ)が表示されない

①モニタの電源が入っていますか？

→モニタ正面下部のLED ランプが点灯状態を確認します。

- ・無点灯：モニタに電源が入っていて、ビデオ信号を受け取っている or 電源が入っていない。
- ・オレンジ色に点灯：モニタに電源が入っているが、ビデオ信号を受け取っていない。



②モニタの電源アダプタのスイッチは入っていますか？

→電源アダプタのスイッチを ON にします。


※モニタモデルによっては電源アダプタにスイッチがない場合があります。



※電源アダプタの筐体はモニタモデルにより異なります。


③モニタの電源ケーブルはきちんと接続されていますか？

→モニタ本体に接続されている電源ケーブル、コンセントに接続されている電源ケーブルがきちんと接続されていることを確認します。もしくは、一度外して再接続します。

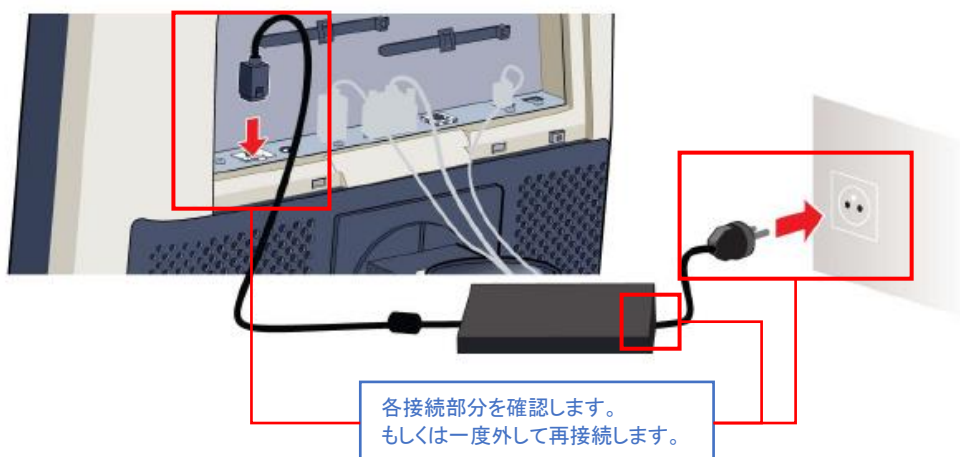

④モニターとPCを接続するビデオケーブルはきちんと接続されていますか？

→ビデオケーブルのモニター側（③または④）、PC側にてきちんと接続されていることを確認します。
もしくは、一度外して再接続します。

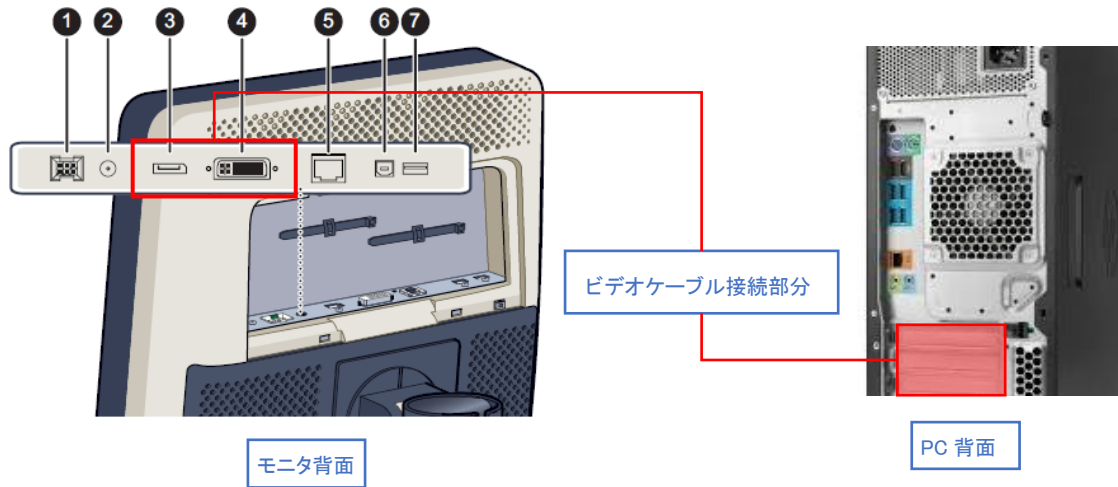


以上をご確認いただいても解消しないようであれば、下記までご連絡ください。

東陽テクニカ メディカルシステム営業部

TEL : 03-3245-1351 E-mail : medical@toyo.co.jp

■お電話のときに、モニターのモデル、シリアル番号(S/N)をご教示ください。

→モニターのモデル・シリアル番号の確認方法

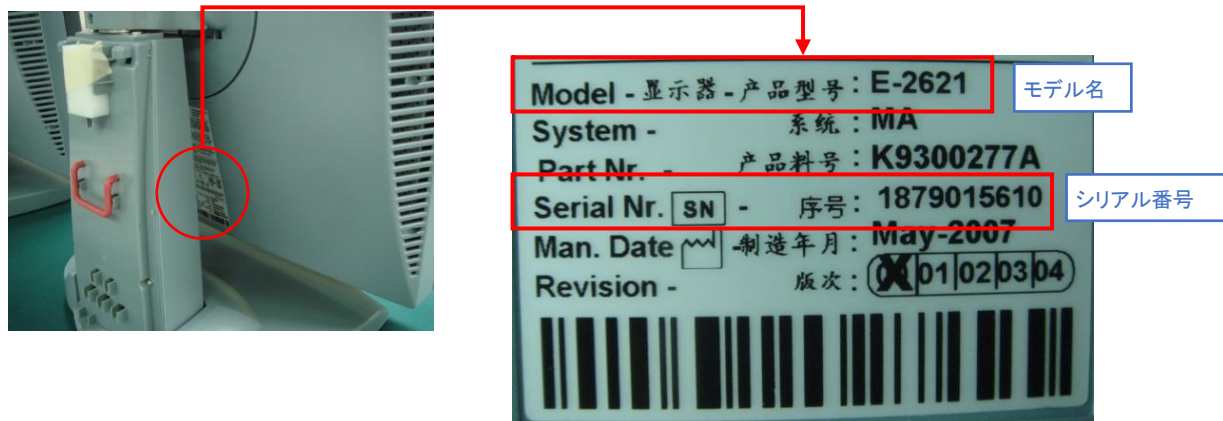

また、可能であれば…

複数モニターをお持ちであれば、正常なモニター(A)と不具合モニター(B)の ①電源ケーブル ②ビデオケーブル をそれぞれ入れ替えたときの表示結果をご連絡いただけますと幸いです。